






תצוגה :

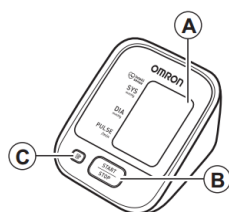

- A. תצוגה
- B. כפתור הדלקה/כיבוי
- C. כפתור זיכרון

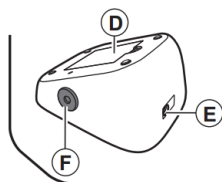

- D. תא הסוללות
- E. חיבור לשנאי
- F. פתח חיבור השרוול

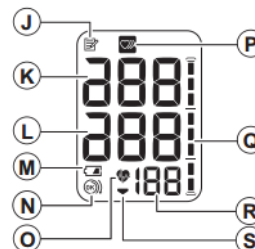


- | | |
|----------------------|----------------------------|
| J. סמל זיכרון | P. סימון דופק לא סדיר |
| K. לחץ דם סיסטולי | Q. מחוון רמת לחץ הדם |
| L. לחץ דם דיאסטולי | R. תצוגת דופק/מספר הזיכרון |
| M. סימון סוללה חלשה | S. סימון הוצאת האוויר |
| N. מנחה כריכת השרוול | |
| O. סמל הדופק | |


אופן המדידה



1. יש לבצע את המדידה בישיבה מול שולחן לאחר מנוחה של כ-10 דקות.
2. יש להניח את כל האמה על השולחן כאשר כף היד מופנית כלפי מעלה

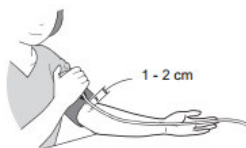

3. יש להדק את השרוול היטב על זרוע יד שמאל כ-2 ס"מ מעל כיפוף המרפק כאשר הצינורית תצא מאמצע כיפוף מרפק.

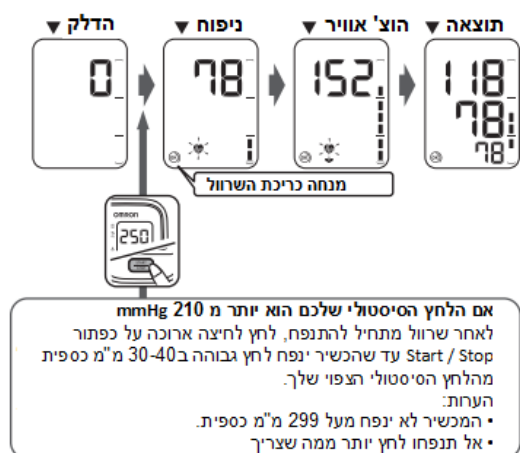

4. הדלק את המכשיר ע"י לחיצה על הכפתור הכחול (B).
5. המכשיר יתחיל את המדידה אוטומטית עם הלחיצה הראשונית על הכפתור הנ"ל ובסיום המדידה יופיע על הצג תוצאת לחץ הדם : סיסטולי, דיאסטולי ודופק.
6. יש לבצע שתי מדידות בהפרש של דקה עד שתי דקות בין מדידה למדידה ולהתייחס לתוצאת המדידה השנייה.
7. מטרת המדידה הראשונה הינה הסתגלות למכשיר ולכן אין להתייחס לתוצאות הבדיקה הראשונה (שהיא לרוב גבוהה יותר).

8. חשוב לזכור כי בימים הראשונים של השימוש במכשיר תתכן קבלת תוצאות גבוהות מהתוצאות הרגילות. תופעה זו נפוצה ונובעת מעצם השימוש במכשיר החדש.

לתמיכה ושירות ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות OMRON בחברת אגנטק

פתוח בימים א'-ה' 8:00-16:00, ו' 08:00-13:00

קרית עתידים, בנין מס' 2, ת.ד. 58008, תל אביב 61580

טלפון: 03-6446468 • www.agenteksport.co.il