

מדריך הפעלה

טלפון אלחוטי

BigTel 1200



ברכות על רכישתכם

BigTel 1200 משלב בין אפרכסת עם עוצמת קול, צלצול ודיבורית חזקים במיוחד, לעיצוב מסוגן. מאפיינים נוספים כוללים חיווי צלצול וויזואלי, לחצן להגברה נוספת של עוצמת הקול, תאימות עזר למכשירי שמיעה (tcoil) ובקרה על הצליל להשגת צליל ברור המותאם לצרכי השמיעה שלכם.

התקנה

מכשיר זה נועד לשימוש עם קווי רשת טלפון אנלוגיים.

חיבור

1. חברו את המתאם לשקע חשמל בקיר ול-  שביחידת הבסיס.

מכשיר טלפון ספציפי. על מנת להבטח שמכשיר שמיעה מסוים יפעל היטב עם מכשיר טלפון זה, בדקו אותם יחד לפני שאתם מבצעים רכישה של המכשיר.

אזהרות סיפול ותחזוקה

	התראה
השתמשו אך ורק בסוללות, שנאי ואבזורים המאושרים לשימוש עם דגם מסוים זה. חיבור של אבזורים אחרים עשוי להיות מסוכן ולבטל את תוקף היצרן ואחריות דגם הטלפון. השנאי הראשי הינו רכיב הניתוק בין המוצר למקור החשמל. על שקע החשמל להיות ממוקם קרוב לצידו נגיש בקלות.	

היחידה שלכם מהווה מוצר מתקדם מבחינה טכנית ויש להתייחס אליו בזהירות רבה. הזנה עשויה לבטל את תוקף האחריות.

- הגנו על היחידה מפני לחות, גשם/שליגים, לחות וכל סוגי העוזלים יכולים להכיל חומרים גורמים להחלדה של המעגלים החשמליים. אם היחידה רטובה, עליכם לנתק אותה, להוציא את הסוללה ולתת ליחידה להתייבש לחלוטין טרם החלפתה.
- אין לעשות שימוש או לשמור את היחידה בסביבות מאובקות ומלוכלכות. החלקים הניידים של היחידה והרכיבים החשמליים שלה יכולים להיפגם.
- אין לשמור את היחידה במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות יכולות לצמצם את תוחלת החיים של ציוד אלקטרוני, לגרום נזק לסוללות ולעלות או להמיס חלקי פלסטיק מסימיים.
- אין לשמור את היחידה במקומות קרים. כאשר היחידה מתחממת לטמפרטורה גבוהה, עיבוי יכול להיווצר בחלק הפנימי ולגרום נזק למעגלים החשמליים.
- אין לנסות ולפתוח את היחידה בכל דרך אחרת מוז המצוית כאן.
- אין להפיל את היחידה. אין להכות או לנער את היחידה. אם מתייחסים ליחידה בנקשות, הדבר יכול לגרום לקלקול המעגלים ומנגנוני הדיוק.
- אין לעשות שימוש בחומרים כימיים חזקים לניקוי היחידה.
- ספק הכוח מתאים להפעלה במתח חשמל של 100-240V Hz50/60
- יש לוודא כי החיבור של ספק הכוח לשקע החשמל נעשה כהלכה אחרת הספק עלול להתחמם ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
- תקנו את המכשיר מהחשמל כאשר נפלט ממנו עשן, ריח לא נעים או כאשר נשמע ממנו רעש מוזר. מקרים אלו עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- כאשר המכשיר ניזוק או נשבר נתקו אותו מהחשמל ואל תגעו בחלקיו הפנימיים. יש להעבירו לבדיקה במעבדת שירות.
- אין לעת או לחבר את ספק הכוח בידיים רטובות - סכנת התחשמלות.

- חברו את כבל קו הטלפון לשקע חשמל של רשת תקשורת ול-  שביחידת הבסיס.
- הכניסו את הסוללות 1.2 x 2 וולט 500 AAA אמפר/לשעה NiMH לתוך האפרכסת בהתאם לסימונים.
- מקמו את האפרכסת לתוך יחידת הבסיס לטעינה (24 שעות בטעינה ראשונה).

שימו לב: השתמשו בקו כבל הטלפון אשר סופק לכם. קו כבל קיים ממכשיר טלפון קודם עשוי שלא להתאים.

הגדרות בסיסיות

הגדרת שפה

- לחצו על .
- בחרו Einstell ולחצו .
- בחרו Mobilteil einstellen ולחצו .
- בחרו Sprache ולחצו .
- בחרו את השפה ולחצו .

צליל

בקרת עוצמת קול

במהלך שיחה, לחצו על  או על  לכוונון עוצמת הקול. גובה עוצמת הקול מצוין על גבי הצג.

טיפ: כאשר אתם מסיימים את השיחה, ההגדרה תישאר בעוצמה האחרונה שברחרתם.

בוסט (הגברת צליל)

	התראה
עוצמת הקול של השפות יכולה להיות מאוד גבוהה. בפונקציית הגברת הקול (בוסט) יש לעשות שימוש רק על ידי אנשים הסובלים מלקות בשמיעה.	

לחצו על לחצן האוזן שבצד השפופרת, להפעלה/לנטרול הגברת עוצמת הקול. **פונקציית הגברת הקול מנוטרלת בסיום כל שיחה במטרה למנוע פגיעה באנשים בעלי שמיעה תקינה.**

תאימות עזר שמיעה

מכשיר טלפון זה תואם לשימוש עם מכשיר שמיעה. בחרו באפשרות של T-mode במכשיר השמיעה שלכם. תאימות של מכשיר שמיעה אינה ערובה לכך שמכשיר שמיעה ספציפי יפעל עם

- כאשר ספק הכוח או הכבל נרטבו יש לנתקו באופן מידי מהשקע בקיר ולא להשתמש בו עד לייבושו המלא.
 - אין להשתמש במכשיר ליד ציוד רפואי או ליד אנשים המשתמשים בקוצבי לב. תתכן השפעה של הטלפון על תפקוד ציוד זה.
 - יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל.
- ⚠ אזהרה: טלפון זה מסוגל להפיק עוצמות קול גבוהות במיוחד כאשר כפתור ההגברה מכוון למקסימום. יש להיזהר כאשר האפרכסת בשימוש אדם כבד שמיעה ואדם בעל שמיעה תקינה ביחד. חשיפה לעוצמות קול גבוהות עלולה להזיק לשמיעה.**

העצה לעיל חלה על היחידה, על הסוללה ועל אבזרים אחרים. אם היחידה אינה פועלת כפי שצריך, אנא צרו קשר עם המקום בו נרכש המכשיר לקבלת שירות. אל תשכחו את הקבלה או עותק מהחשבונית.

אחריות

מוצר זה נמצא באחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה. במקרה לא סביר של תקלה במכשיר במהלך תקופת האחריות, אנא צרו קשר עם המקום בו נרכש המכשיר. נדרשת הוכחה על רכישת המכשיר עבור כל שירות או תמיכה הנדרשים במהלך תקופת האחריות.

אחריות זו לא תחול על תקלה הנגרמת כתוצאה מתאונה או מקרה או נזק דומה אחר, כניסה של נוזל, הזנחה, שימוש לא תקין, תחזוקה לא נכונה של המכשיר או כל נסיבה אחרת במצד המשתמש. מעבר לכך, אחריות זו לא תחול על כל תקלה הנגרמת כתוצאה מסופת ברקים או כל סוג של תנודות במתח החשמלי. כאמצעי הגנה, אנו ממליצים לכם לנתק את המטען במהלך סופת ברקים. הסוללות אינן כלולות באחריות. אחריות זו אינה חלה במקרה בו נעשה שימוש בסוללות אחרות שאינן מהסוג המקורי.

יבואן: אודיוקור תקשורת בע"מ

שיעור ספיגה ספציפי (SAR)

מכשיר זה עומד בדרישות הבטיחות הבינלאומיות הישימות לחשיפה לגלי רדיו. ערך ה-SAR הגבוה ביותר תחת קווי הנחיית ICNIRP לשימוש במכשיר באוזן הוא 0.0597 וואט/לק"ג הנמדד על פני רקמה של 10 גרם. הגבול המרבי בהתאם ל-ICNIRP הינו 2.0 וואט/לק"ג הנמדד על פני רקמה של 10 גרם.

הוראות משרד התקשורת:

אסור להחליף את האטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר המכשיר אינו מוגן מפני הפרעות אלחוט
אין להעביר לגורמים בתחום הפלסטיני, ללא אישור מראש, ובכתב מאת מקמ"ט תקשורת במנהל האזרחי.